

ENOLAPI S.r.l.

Via Torricelli 69/a
37136 Verona
Tel. 045 955021
Fax 045 8625312
P. Iva 03272480231

ENOLAPI INJECTOR 5 ml - ENOLAPI MINI INJECTOR 5ml

ISTRUZIONI PER L'USO:

- 1 La quantità di prodotto erogabile (0-5 ml) può essere regolata con l'apposita vite
- 2 L'apparecchio è adatto alla somministrazione di prodotti chimici per uso apistico.
- 3 Per garantire una lunga durata nel tempo è essenziale una accurata pulizia dell'apparecchio dopo l'uso con acqua possibilmente tiepida.
- 4 Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore lo danneggerebbe.
- 5 L'apparecchio può essere danneggiato dall'uso di solventi e/o prodotti chimici diversi da quelli normalmente autorizzati in apicoltura

MANUTENZIONE:

Ogni volta che ENOLAPI INJECTOR viene usato va lavato accuratamente con acqua possibilmente tiepida.

- Periodicamente va fatta una manutenzione straordinaria

Si procede come segue:

- 1 svitare il cilindro 3
 - 2 svitare la valvola 6, che si trova in fondo al cilindro, e rimuovendo delicatamente la cuffia 4, pulire accuratamente con acqua. Lubrificare poi con olio di vaselina
 - 3 togliere il tappo 7 (è inserito a pressione sulla testa del pistone 11) con un piccolo cacciavite.
 - 4 sfilare la molla 8 e la valvola 9 e pulire accuratamente con acqua.
 - 5 controllare l'integrità della guarnizione 10 sul pistone e lubrificare la guarnizione 10 con olio di vaselina o grasso di vaselina.
- se ENOLAPI INJECTOR non ricarica, significa che una o tutte e due le valvole sono sporche, procedere ad una manutenzione straordinaria.
 - se la molla non fa ritornare la maniglia dopo l'eiezione o ritorna con difficoltà, svitare e lavare con acqua tiepida il cilindro 3 e lubrificare la guarnizione 10.

